

# 新鮮凍結血漿融解装置 ドライスイング

型式：D2


Mtec

DRY SWING D2



## もみほぐしてムラなく解凍

上下の加熱プレートで血漿バッグを温めながら、上部加熱プレートのスイング機能で血漿バッグ内部まで循環させ、効率よく解凍する独自技術(特許技術)により、ドライ式でありながらスピーディーな解凍性能を実現しました。オープンタイプで解凍状況が確認できるため、さまざまな状況に対応できます。

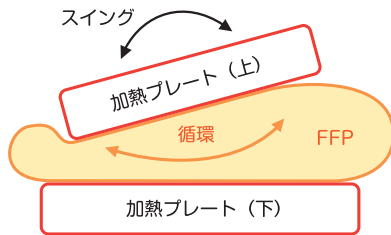

## 簡単操作で安心

予熱等の事前準備が必要なく、①モードを選択し、②スタートボタンを押すだけの簡単操作です。設定した解凍モードの時間がきたらブザーでお知らせし、自動で加温/保温モード(最大60分)に切り替わるため、時間に縛られることはありません。



## 製品仕様

製品名	ドライスイング D2
電源入力	10 A 1000 VA
寸法	345(幅)×530(奥行)×180(高さ) (mm)
重量	16.2 kg
電撃に対する保護	クラスI

## 自由な時間設定

血漿バッグの冷凍温度に合わせた解凍時間を自由に設定できます。一度設定した解凍時間は記憶され、次回以降はモードを選択しスタートボタンを押すだけで解凍が開始されます。血漿バッグのサイズ(FFP-LR240・FFP-LR480)ごとに、それぞれ2パターン計4パターンの設定(15~60分)を登録することができます。また、使用環境に合わせ、適宜設定を変更することも可能です。

	FFP	FFP-LR240		FFP-LR480	
	表示部	1_	2_	1_	2_
冷凍温度	-20℃	20分	22分	33分	38分

FFP液温30℃までの解凍時間(出荷時設定)

## 簡単メンテナンスで衛生的

水を使用しないドライ式のため、細菌の感染リスクを大幅に低減できます。血漿バッグ接触面は一体型アルミプレートで、メンテナンス性を追求した丸みのある形状のため、拭き取るだけで簡単に清潔を保つことができ、日常のメンテナンス作業を大幅に軽減できます。



血漿バッグサイズ	FFP-LR240、FFP-LR480
血漿バッグ数	最大2バッグ(同サイズ)
モード種類	解凍モード：4パターン (FFP-LR240/FFP-LR480：2パターンずつ) 加温/保温モード：1パターン
時間設定範囲	解凍モード：15~60分 加温/保温モード：連続無制限

医療機器届出番号：23B3X10018000003

### 販売業者



平和物産株式会社

<https://www.heiwa-bussan.co.jp/>

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル  
TEL:03-3287-0731 FAX:03-3285-0570

### 製造販売業者



株式会社エムテック

<https://www.m-tec-m.co.jp>

〒481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師女夫越3番地  
TEL:0568-25-3126